

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

### 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

<b>警告</b>	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
<b>注意</b>	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- 注意する
- してはいけない
- 必ず守る

### ■施工上のご注意

<b>注意</b>	
<p>設置は、工務店など施工の専門業者で行ってください。</p> <p>周囲の状況に十分配慮した場所に設置してください。本製品にぶつかったり、つまずいたり、通行などの妨げになります。</p> <p>十分な強度のある壁面に確実に固定してください。落下・故障・けがの原因になります。</p>	<p>ボックスを壁際に取付ける際は、壁面から15mm以上離してください。ドアが開かなくなります。</p> <div style="text-align: right;"> <p>15mm以上</p> <p>壁</p> </div>

### ■使用上のご注意


<b>警告</b>	
<p>長期間の使用で取付部(ねじ、ナット)などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増し締めをしてください。落下・破損の原因になります。</p>	

<b>注意</b>						
指に注意 扉を勢よく閉めないでください。指を挟みけがの原因になります。	<p>本製品の上に物を置かないでください。落下・故障・けがの原因になります。</p> <p>本製品の上に載ったり、もたれたりしないでください。落下・故障・けがの原因になります。</p>					
<p>本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。</p> <p>本製品の周りに、視界を遮るような物や、扉の開閉を妨げる障害物などを置かないでください。AED使用時の妨げになります。</p> <p>次のような場所では使用しないでください。故障・けがの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温、高温となる場所</li> <li>・腐食性ガスのある場所</li> <li>・振動、衝撃のある場所</li> <li>・可燃性ガスのある場所</li> <li>・塵埃やオイルミストが多い場所</li> <li>・導電性粉塵(カーボン繊維・金属粉など)のある場所</li> <li>・ノイズ(電界、磁界)の強い場所</li> <li>・有機溶剤のかかる場所</li> <li>・塩分を多く含んだ場所</li> <li>・水滴のかかる場所</li> </ul>	<p>AED機器を必ず固定バンドで固定してください。正しく固定されない場合、落下・故障・けがの原因になります。</p> <p>使用するねじなどは指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ねじの呼び</td> <td>適正締付トルク N・m</td> </tr> <tr> <td>小ねじ M3</td> <td rowspan="2">0.5 ~ 1.0</td> </tr> <tr> <td>カバー取付小ねじ M3</td> </tr> </table>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	小ねじ M3	0.5 ~ 1.0	カバー取付小ねじ M3
ねじの呼び	適正締付トルク N・m					
小ねじ M3	0.5 ~ 1.0					
カバー取付小ねじ M3						

### ■警報アラーム取扱いのご注意

<b>注意</b>	
分解禁止 分解、改造をしないでください。感電・火災の原因になります。	<p>強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。</p>
水ぬれ禁止 水をかけないでください。故障の原因になります。	<p>スピーカ部から埃やゴミが入らないようにしてください。故障の原因になります。</p> <p>警報アラームは大音量(約90dB)の音が鳴りますので、耳をそばに近づけないでください。聴覚が低下するおそれがあります。</p>

## ■各部の名称

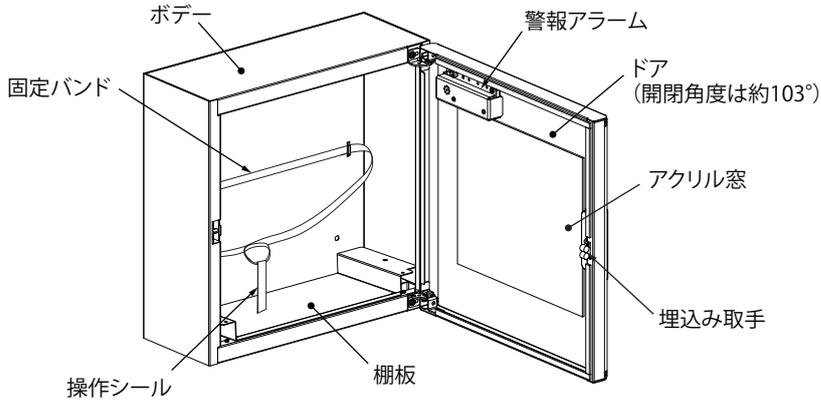


## ●付属品

名称	数量
単4電池	2コ
電池交換確認ラベル	1枚
取扱説明書(本紙)	1部

## ■仕様

品名記号	塗装色	外形寸法 mm			有効フカサ mm	製品質量 kg	摘要
		ヨコ	タテ	フカサ			
AED-KC	クリーム塗装	400	400	180	170	6.0	棚板・固定バンド付
AED-KO	オレンジ塗装	〃	〃	〃	〃	〃	

### 【外形寸法図】

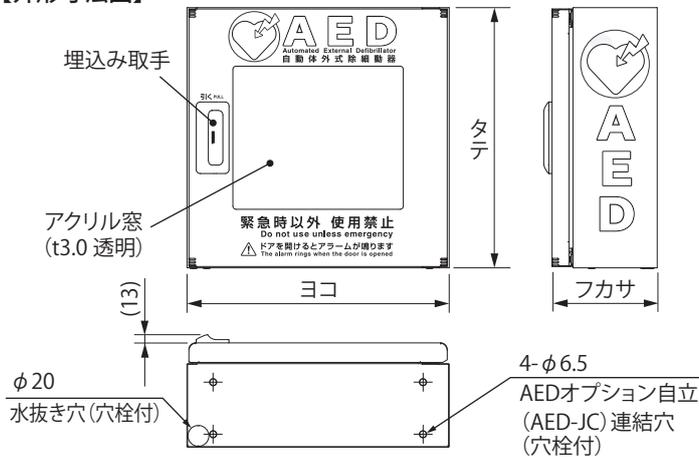

【ご注意】 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

## ■設置手順

AED 機器を準備していただき、下記の手順で設置を行ってください。




## ■設置方法

### ●壁面に取り付ける場合

1. 壁面取付ダルマ穴に対応した位置に、適切なねじ 2点を壁に仮止めしてください。
2. 壁面取付ダルマ穴をねじに引掛けます。
3. 下側の壁面取付穴にねじ 2点を仮止めます。
4. 仮止めしたねじ 4点を本締めしてください。

### 【取付寸法図】

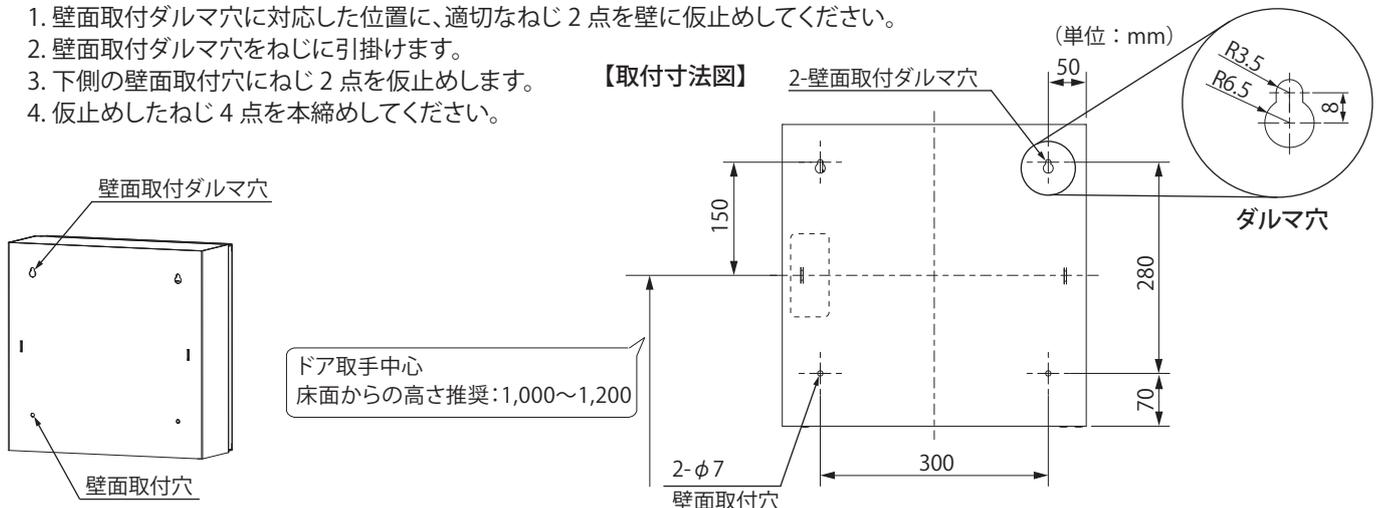


### ●AEDオプション自立 (AED-JC) に取り付ける場合

AED オプション自立 (AED-JC) の取扱説明書を参照してください。


## ■AED機器の取付方法

1. 操作シールを引張って固定バンドを外してください。

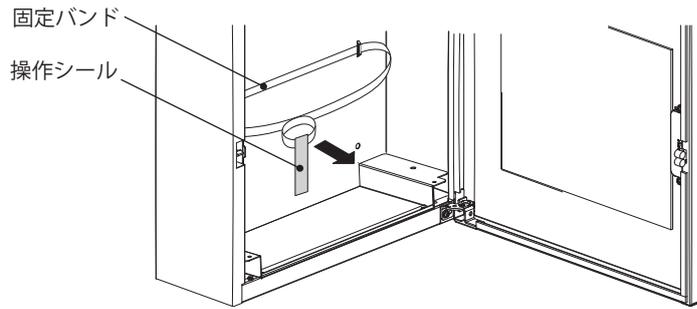

2. AED 機器を棚板に置いてください。

**ご注意** 棚板は AED 機器を安定させるため、奥に向かって少し傾斜がつけてあります。ボックスの中心奥へ置いてください。

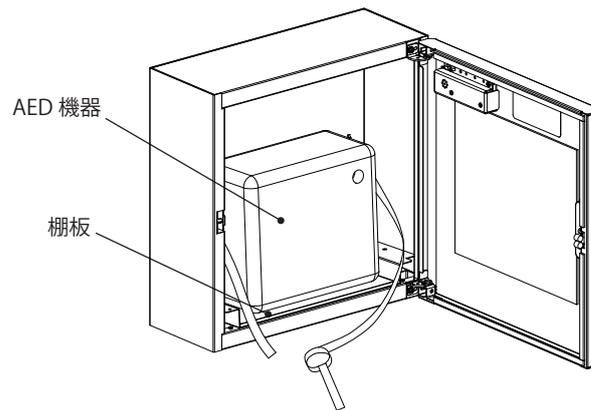

### ●AED機器の背が低い場合

AED 機器の背が低い場合は設置後、取り出しづらい場合があります。本製品は AED 機器を取り出しやすくするため棚板の高さを高くすることができます。

1. 棚板固定用の小ねじ M3×6 (2 か所) を取り外してください。(図 1)
2. 上下を反転し、小ねじ M3×6 (2 か所) にて固定してください。(図 2)

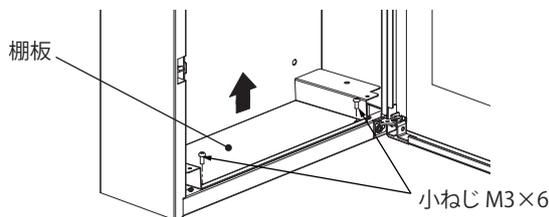


図 1

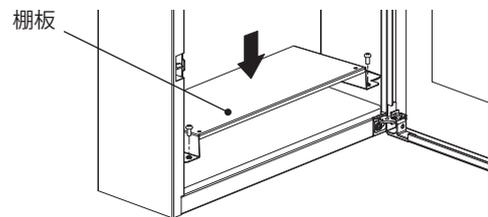


図 2

### ⚠ 注意




取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。  
締め付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。  
また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
小ねじ M3	0.5 ~ 1.0

3. AED 機器を固定バンドで巻いて確実に固定してください。



**ご注意**

固定バンドは面ファスナー状になっています。AED 機器使用時に外しやすいよう操作シールを前面左隅のよく見える位置に表示してください。

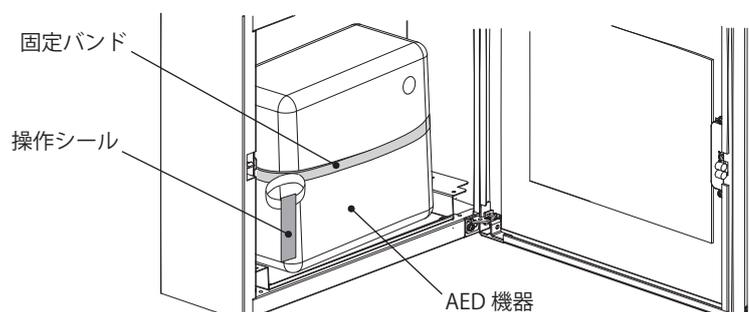

## ■警報アラームのセット方法

1. 警報アラームの ON/OFF スイッチを OFF の位置にしてください。
2. カバー取付小ねじ M3×6 を外し、アラームカバーを取り外してください。
  - ・付属の電池 2 コを+/-表示に従ってセットし、アラームカバーを戻してカバー取付小ねじ M3×6 を取り付けてください。

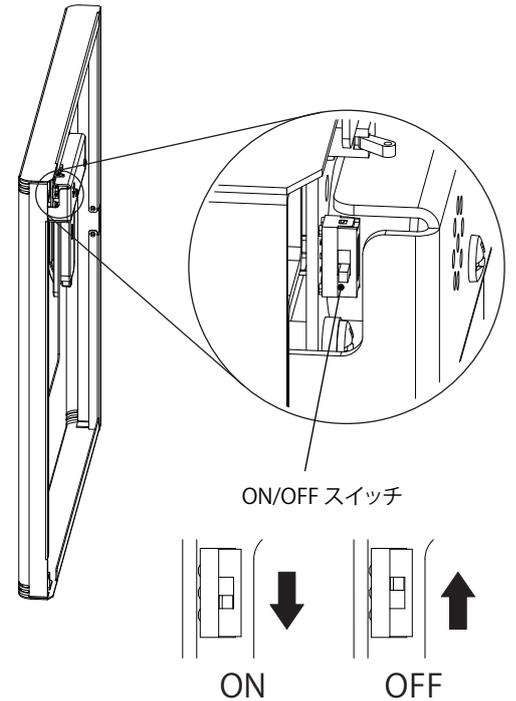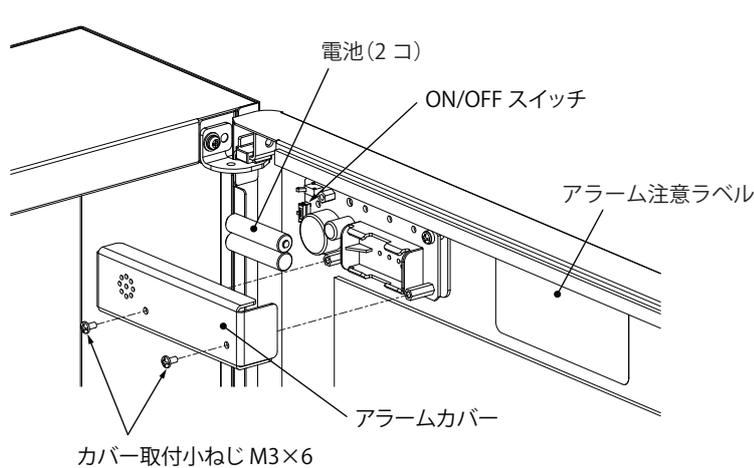

3. 警報アラームの ON/OFF スイッチを ON の位置にしてください。

### 【ご注意】

- ・ON/OFF スイッチを ON にすると警報が鳴ります。ドアを閉めると警報は鳴り止みます。ドアを開けると警報アラーム音は鳴り続け、ドアを閉めるまで警報アラーム音は鳴り止みません。
- ・購入時の電池はテスト用のため、早めに交換してください。
- ・電池の寿命の目安は約 10 ヶ月です。
- ・警報アラームの音が小さくなったら早めに電池を交換してください。

## ⚠ 注意



警報アラームは大音量(約 90dB)の音が鳴りますので、耳をそばに近づけないでください。聴覚が低下するおそれがあります。




取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
カバー取付小ねじ M3	0.5 ~ 1.0


## ■オプション

### ●AEDオプション自立【AED-JC】

AED収納ボックスを上に取り付けられます。救急用品、防災用品などを収納することができます。

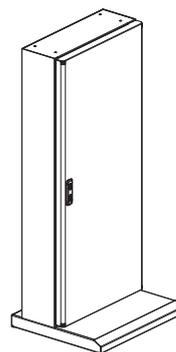

AED-JC

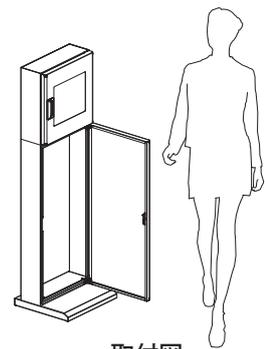

取付図

施工業者名			
TEL			
施工年月日	年	月	日

### お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2022年12月  
B779110923  
SK-106F

**NITTO KOGYO**

©NITTO KOGYO CORPORATION